

HL CompoKnife +



CompoKnife nimi tulee sanasta "composite" (yhdistelmämuovi) ja "knife" (veitsi). Instrumentti on suunniteltu ylimäärämuovien ja sidosaineitten vuolemiseen pois hampaiden pinnoilta. Ohuen terän ansiosta sillä voi poistaa myös esimerkiksi värjäytymiä ahtaista hammasväleistä.

Veitsi on aina terävä, koska siinä käytetään kertakäyttöisiä, erittäin teräviä kirurgisia teriä nro 12. Terä kannattaa vaihtaa aina käytön jälkeen. Tällöin veitsellä voi vuolla helposti pois yhdistelmämuovipaikkojen ylimääriä ja myös amalgaamatäytteitten ylimääriä.


Veitsi on helppo puhdistaa ja steriloida. Se on helppo purkaa kolmeen osaan vain käden käänteessä.

Veitsen varsi on suunniteltu erityisesti kertakäyttöisiä kaarevia kirurgisia teriä nro 12 varten, mutta siinä voi käyttää kaikkia kirurgisia teriä tarpeen mukaan.

Terä voidaan asentaa veitsen kärjessä olevaan hahloon siten, että vain lyhyt osa terää jää näkyviin. Tällöin terän kiinnitys suojaa työskentelyalueen pehmytkudoksia vaurioilta.

Tukeva terän kiinnitys mahdollistaa veitsellä tapahtuvan vuoleamisen, koska terä ei taivu sivusuunnassa kuten perinteisillä veitsenvarsilla työskenneltäessä tapahtuu. Vuoleminen antaa paremman lopputuloksen kuin esimerkiksi sirpillä tapahtuva ylimäärien lohkominen.

CompoKnife tuli markkinoille jo 9 vuotta sitten ja sen ovat ottaneet omakseen lukuisat kansainvälisesti tunnetut korjaavan hammashoidon kouluttajat ja luennoitsijat eri puolilla maailmaa. Vaikka veitsi on suunniteltu alkuaan yhdistelmämuovien viimeistelyyn, on sen käyttö laajentunut mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin hammaslääkärien, lääkärin ja laboratorioväen keskuudessa.

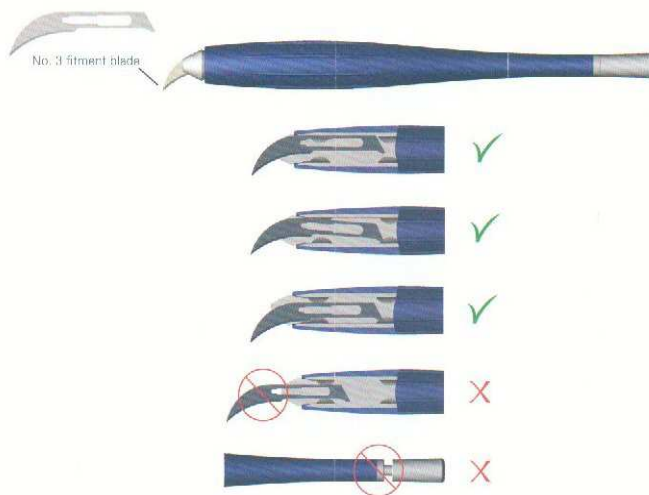




HL CompoKnife+ on suunniteltu erityisesti paikkauksessa ja sidostamisessa syntyvien ylimäärien poistoon.



Veitsi on helppo purkaa osiin puhdistusta ja sterilointia varten.

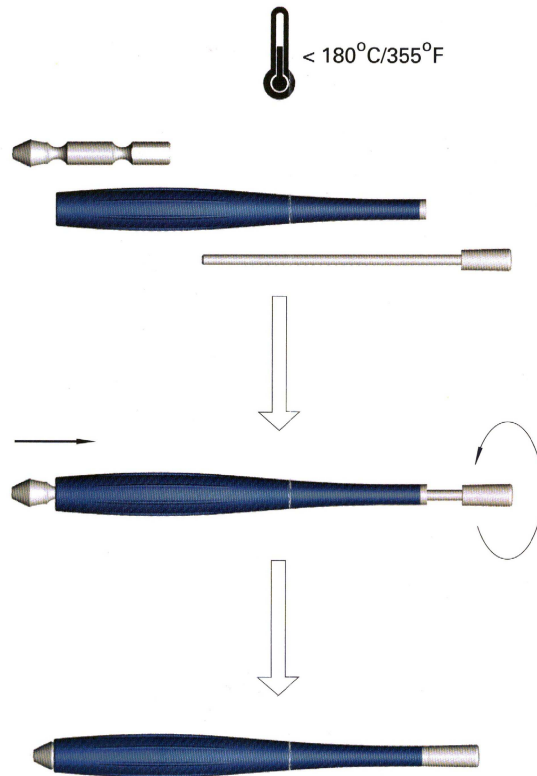

Veitsen kokoaminen puhdistuksen jälkeen.



Huomaa työskennellessä aina hyvä sormituki!

Lisätiedot ja luettelo jälleenmyyjistä: hannu.laamanen@demetor.com