

## Suomi - myQuickmat Forte kit

### Luokan II restauraatio myQuickmat Forte -tuotteella

Sektorimatriisijärjestelmä, joka on kehitetty voimakkaaseen hampaiden separointiin. MyRing Forte -renkas separoi hampaat ja sen anatomisesti muotoillut, uudelleenkäytettävät kärjet takaavat matriisin täydellisen istuvuuden. myWedge -muovikiila muotoilee matriisin hampaan servikaaliselle alueelle




#### Käyttöohje:




##### 1. Kaviteetin valmistelu

Poista karioitunut hammaskudos sekä muotoile ja viimeistele kaviteetti tarvittavalla tavalla. Matriisin voi asettaa, vaikka kontaktialuetta ei ole avattu kokonaan.

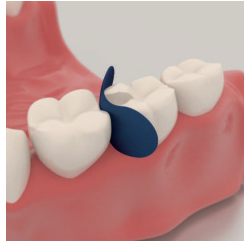


##### 2. Matriisin asettaminen

Valitse sopiva matriisi hampaan morfologian ja restauraatiotyypin mukaan. Aseta muotoiltu sektorimatriisi paikalleen kovera reuna okklusaalisesti sormin tai atuloilla.

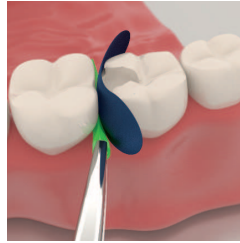


##### 3. Kiilaus

Valitse oikeankokoinen myWedge -muovikiila ienrajan sulkemiseen ja aseta se tiiviisti paikalleen. Tarvittaessa pidä matriisia paikallaan välttääksesi sen siirtymisen pois paikaltaan kiilauksen aikana.

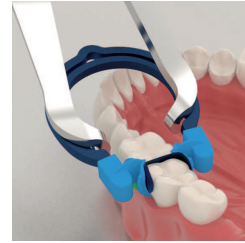


##### 4. myRing Forte -renkaan asettaminen paikalleen

Avaa myRing Forte -renkasta Polydentian myForceps-pihdeillä. Avaa rengasta vain sen verran kuin hampaalle asettamiseen vaaditaan. Aseta myRing Forte varovasti kiilan päälle ja niin pitkälle gingivaalisesti kuin mahdollista

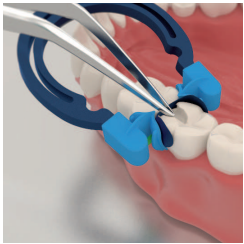


##### 5. Matriisin muotoilu

Paina matriisi viereistä hammasta vasten käsi-instrumentilla tai atuloilla erinomaisen kontaktin aikaansaamiseksi.

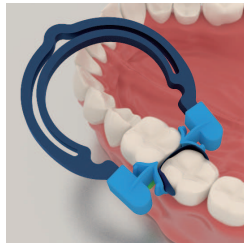

##### 6. Kaviteetin täyttö

Täytä kaviteetti täytemateriaalin valmistajan antamia ohjeita noudattaen.

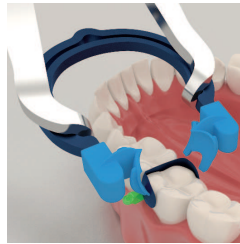

##### 7. Sektorimatriisijärjestelmän poistaminen

Poista myRing Forte -renkas, kiila ja matriisi. Matriisin helppoon poistamiseen suosittelemme Polydentia myQuickmatrix Forceps -pihtien käyttöä.



##### 8. Viimeistely ja kiillotus

Poista ylimäärät ja kiillota restauraatio viimeistely- ja kiillotuslaitteiden valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

#### Suosituksia:

- 1 - Kofferdamin käyttäminen
- 2 - Lue puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet osoitteessa [www.polydentia.com](http://www.polydentia.com)

## Suomi - myQuickmat Forte kit

### Vinkkejä ja ohjeita myQuickmat Forte -tuotteen käyttöön



#### Kärkien poistaminen

Kärjet on aina poistettava ennen puhdistusta ja desinfiointia. Kärkien poistossa on tärkeää varmistaa, että anatomiset sisäsiivekkeet eivät vaurioidu. Poista kärjet sen vuoksi ulommasta osasta kiinni pitäen. Lisätietoja puhdistuksesta ja steriloinnista on asiakirjassa "Puhdistus- ja sterilointiohjeet"

#### Kärkien asettaminen myRing Forte -renkaaseen

Vaihtokärjet toimitetaan pareittain toisiinsa kiinnitettyinä. Kärjet on helppo irrottaa toisistaan. Käsittele anatomisia sisäsiivekkeitä erityisen varovasti, liikaa painetta välttäen, jotta siivekkeet eivät vaurioidu. Varmista, että kärjet asetetaan myRing Forte -renkaaseen kuvassa esitetyllä tavalla.

#### MOD ja usean hampaan restauraatiot






MyRing Forte -renkaat on suunniteltu päällekkäiseen asetukseen MOD-restauraatioissa ja usean hampaan restauraatioissa.

1. Valmistele kaviteetit käyttöohjeiden kohdassa 1 kuvatulla tavalla.
2. Aseta matriisit ja kiilat restauroitavan hampaan mesiaali- ja distaalipinnoille
3. Aseta myRing Forte -renkaat
4. Valmista restauraatio käyttöohjeiden kohdissa 5-8 kuvatulla tavalla.

#### Vierekkäisten kaviteettien restauraatiot

MyRing Forte -renkaan kärjet on muotoiltu sopimaan täydellisesti kahden vierekkäisen hampaan mesiaali- ja distaalipinnoille. Tämä ominaisuus mahdollistaa kahden vierekkäisen kaviteetin restauraatiot samanaikaisesti.


1. Valmistele kaviteetit käyttöohjeiden kohdassa 1 kuvatulla tavalla.
2. Aseta kiila ja matriisit kumpaankin restauroitamaan hampaaseen
3. Aseta myRing Forte
4. Valmista restauraatiot käyttöohjeiden kohdissa 5-8 kuvatulla tavalla.

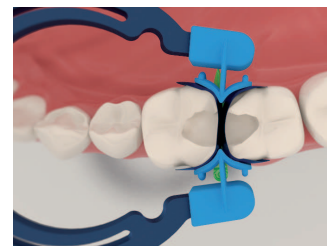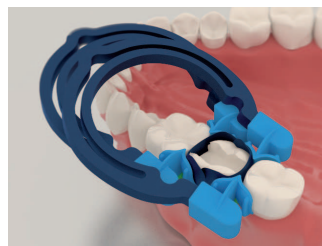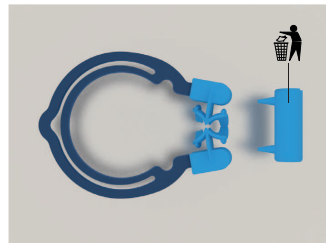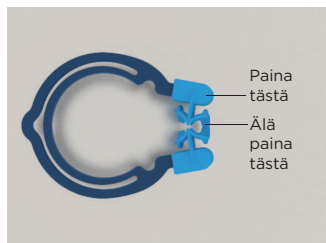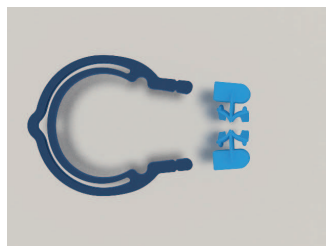

#### myRing Forte -renkaan muodon palauttaminen

Jos myRing Forte -rengasta avataan liikaa, sen voi palauttaa alkuperäiseen muotoonsa Polydentian myForceps-pihdeillä seuraavalla tavalla:

- Poista ensin kärjet.
- Aseta myRing Forte pihkien loviin.
- Palauta myRing Forte alkuperäiseen muotoonsa painamalla pihdit kiinni.

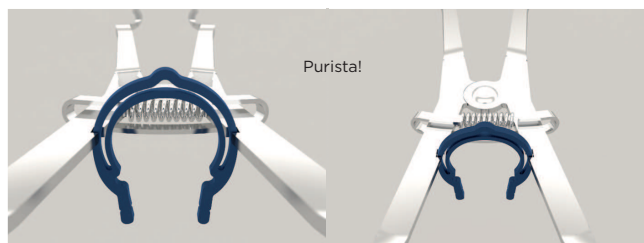

myQuickmat Forte kit - REF 6803