

Koe tehokas ja ammattimainen valkaisu

Kotikäyttöön tarkoitettu
Opalescence Go™-valkaisugeeli
sisältää käyttövalmiin UltraFit™-lusikan,
joka takaa entistäkin helpomman ja
miellyttävämmän valkaisuhoiton.

- Ainutlaatuinen lusikkamateriaali on erittäin miellyttävä käyttää ja muotoutuu paremmin hampaille.
- Lusikka kattaa alueen molaarista molaariin, ja geeli on paremmassa kosketuksessa takahampaiden kanssa.
- UltraFit-lusikka muotoutuu erinomaisesti hampaille ja mahdollisimman runsas määrä geeliä on kosketuksessa hampaiden kanssa valkaisuhoiton aikana.
- Valmiste sisältää 6 % vetyperoksidia (käyttöaika 60–90 minuuttia).
- Potilaspakkaus sisältää (28,3 g) Opalescence™-valkaisuhammastahnaa.





Opalescence
Tooth Whitening go



Muita Opalescence Go -valkaisugeelin ominaisuuksia

- Makuvaihtoehdot Mint ja Melon
- Esitätetyt lusikat ovat heti käyttövalmiita pakkauksesta otettuna
- Optimaalinen geelimäärä helpottaa puhdistusta valkaisuhoiton jälkeen

4634 Opalescence Go Mint 6 % -potilaspakkaus
3592 Opalescence Go Melon 6 % -potilaspakkaus

Pakkaus sisältää 10 läpipainopakkausta, joissa on 1 lusikka ylähampaille ja 1 lusikka alahampaille sekä 1 putkilo Opalescence™-valkaisuhammastahnaa (28,3 g)

4639 Opalescence Go Mint 6 % -potilaspakkaus, 6 kpl/pakkaus
3593 Opalescence Go Melon 6 % -potilaspakkaus, 6 kpl/pakkaus

Pakkaus sisältää 6 potilaspakkausta

4644 Opalescence Go Mint 6 % Mini -pakkaus
3599 Opalescence Go Melon 6 % Mini -pakkaus

Pakkaus sisältää 4 läpipainopakkausta, joissa on 1 lusikka ylähampaille ja 1 lusikka alahampaille

4649 Opalescence Go Mint 6 % Mini -pakkaus, 12 kpl/pakkaus
3600 Opalescence Go Melon 6 % Mini -pakkaus, 12 kpl/pakkaus

Pakkaus sisältää 12 Mini-pakkausta

Kaikkia Opalescence Go -valkaisuutuotteita suositellaan säilytettävän jääkaapissa.

Käyttöohjeet



1. Ota lusikka pakkauksesta.



2. Keskitä se hammaskaarelle.



3. Tee varovainen imaiseva liike.



4. Poista venttilusikka.



5. Tee imaiseva liike.



6. Pidä 6 %:n Lusikkaa suussa 60–90 minuuttia.