

BLANCONE®

STICK



Ainesosat

Glyseriini, propyleeniglykoli, karbamidiperoxidi 16%, deionoitu vesi, karbomeeri, aromi, dinatrium-EDTA, limoneeni, natriumsakkariniini natriumhydroksidi

Hampaanvalkaisukynä

BlancOne STICK on valkaisukynä kotona tehtävään hampaiden valkaisuun. Kahden viikon ajan käytettynä se saa hymysi kirkkaammaksi ja valkoisemmaksi. Poistaa erinomaisesti tupakan, kahvin, teen ja muiden ruoka- ja juoma-aineiden aiheuttamia värjäymiä. Sopii pitkäaikaiseen käyttöön vastaanottovalkaisun ylläpitämiseksi.

KÄYTTÖOHJEET

Käytä kerran päivässä kahden viikon ajan, mieluiten illalla ennen nukkumaan menoa.

1. Harjaa hampaat huolellisesti.
2. Poista korkki ja käännä kynän pohjaa (3–4 klikkausta) myötöpäivään, niin että kynässä oleva harjasosa kastuu geelistä. (TÄRKEÄÄ: ensimmäisellä käyttökerralla saatetaan tarvita useampia klikkauksia, niin että turvakalvo kynän sisällä menee rikki).
3. Annotele geeliä hampaille ja harjaa huolellisesti kahden minuutin ajan hampaiden pintaa. Tänä aikana kostuta säännöllisesti harjasosaa kääntämällä kynän pohjaa myötöpäivään ja harjaa hampaaita. Tavallisesti tarvitaan 10–12 klikkausta riittävään valkaisuainemäärään yhden toimenpiteen aikana.
4. Syjje lopuksi ylimääräinen geeli suusta, älä huuhtele suuta vedellä, älä syö tai juo mitään 30 minuuttia.
5. Toimenpiteen jälkeen kuivaa kynän harjasosa paperipyyhkeellä ja laita korkki takaisin paikoilleen.

Jos tuotetta käytetään ainoana valkaisuimenpiteenä ilman vastaanottovalkaisua, pidä kahden viikon käyttötauko 14 päivän käytön jälkeen. Toista sitten toinen 14 päivän valkaisujakso. Jos valkaisukynää käytetään valkaisun ylläpitoon vastaanottovalkaisun jälkeen, suorita toinen 14 päivän peräkkäinen valkaisujakso vasta 3 kk päästä.

VAROITUKSET

- Prosessin aikana vapautuu 6 % H₂O₂ (vetyperoksidi).
- Älä käytä alle 18-vuotiaille.
- Käytettävä vain laillistetun suunhoidon ammattilaisen toimesta tai heidän välittömässä valvonnassaan, jos riittävä turvallisuustaso varmistetaan. Tämän jälkeen tuote voidaan antaa kuluttajalle käyttöjakson loppuunsaattamiseksi.

- Pidä hampaidenvalkaisutuotteet poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä kosketusta silmien kanssa. Jos ainetta joutuu silmiin huuhtelee silmiä varoen vedellä usean minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.
- Älä käytä suurempia määriä valkaisuainetta kuin valkaisuoprossissa tarvitaan. Jos tuotetta on nieltä pieninä määrinä, tuote on vaaraton, muutoin ota yhteys lääkäriin.
- Joillain potilailla ikenet saattavat herkistyä tai ärtä. Nämä ovat lieviä ja ohimeneviä useimmissa tapauksissa, mutta joskus hammaslääkärin hoito saattaa olla tarpeen.

VAROTOIMET

- Hammastarkastus on pakollinen ennen valkaisua.
- Valkaisu ei valkaise posliinikruunuja ja hammaslääketieteellisiä restaurointeja.
- Valkaisu ei ole tarkoitettu raskaana oleville naisille. Ota yhteys lääkäriin, jos imetät.
- Vältä tupakkatuotteita, kahvia sekä punaviiniä 6 tuntia valkaisuimenpiteen jälkeen.
- Happamat elintarvikkeet/mehut voivat aiheuttaa herkkyyttä, jos niitä nautitaan pian valkaisun jälkeen.
- Kudosten ärsytyistä voi ilmetä, jos hampaiden valkaisu suoritetaan henkilöille, joilla on parodontiitti.
- Jos ilmenee mitä tahansa ikenien ärsytyistä tai hampaiden vihlointaa, lopeta välittömästi tuotteen käyttö ja ota yhteyttä hammaslääkäriin.