

KÄYTTÖOHJE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin aloitat tuotteen käytön. Säilytä tämä käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten.



1. MIKÄ ORALSAN OXYGEL ON JA MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

ORALSAN OxyGel on 11 % karbamidiperoksidia ja 1 % dinatrium-EDTA:ta sisältävä geeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi supra- ja subgingiivaalisen biofilmin luottamiseen ja hammaskiven pehmentämiseen ennen toimenpidettä.

Ennen hammaskiven poiston aloitusta, geeli voidaan annostella helposti sulkukseen asettamalla kärki ikenen ja ientaskun reunaan ja ruiskuttamalla geeliä ienreunaan ja ientaskuun.

Muutamassa sekunnissa geeli alkaa vapauttamaan vetyperoksidia, joka vaikuttaa voimakkaasti sulkuksessa olevaan bakteeriflooraan, kun taas urean ja dinatrium-EDTA:n yhteisvaikutus kalsiumin ja raskasmetallin kanssa tuottaa liukoisia komplekseja, mikä helpottaa biofilmin ja hammaskiven liukenemistä. Tämän esikäsittelyn avulla on mahdollista suorittaa nopeammin depurointi käsi-instrumenteilla tai ultraäänilaitteella. Lisäksi työskennellessä ultraäänilaitteella, geelin avulla on mahdollista käyttää vähemmän vettä, jolloin voidaan vähentää huomattavasti aerosolien tuotantoa. Vetyperoksidilla on myös lievä hemostaattinen vaikutus.

ORALSAN OxyGel sisältää myös natriumhyaluronaaattia, joka edesauttaa ikenien paranemista depuraation jälkeen ja kaliumnitraattia, joka tukkii tubulusia ja vähentää näin hammaskiven poistosta johtuvaa vihlomista. Suuhygieniakäynnistä vastaanotolla saadaan tällä tavoin paljon nopeampi ja mukavampi potilaalle.

ORALSAN OxyGeliä voidaan käyttää profykapaleen kanssa hampaiden pintojen puhdistamiseen ja esivalmisteluun poistamaan tehokkaasti biofilmiä. Sen avulla voidaan nopeuttaa värjäytymien poistoa jauhepuhdistuksen yhteydessä ja parantaa aktiivisen hapen tunkeutumista hampaaseen hampaiden valkaisun yhteydessä.

2. ORALSAN OXYGELIN KÄYTTÖ

Liitä annostelukärki ruiskuun ja ruiskuta pieni määrä geeliä ientaskuun ja hampaan pinnalla. Anna geelin vaikuttaa 1-2 minuuttia, jonka jälkeen aloita depurointi manuaalisesti tai ultraäänilaitteella käyttäen mahdollisimman vähän vettä, jotta vähennetään aerosolien muodostumista.

ORALSAN OxyGeliä voidaan käyttää profykapaleen kanssa hampaiden pinnan puhdistamiseen ja esivalmisteluun poistamaan tehokkaasti biofilmiä. Sen avulla voidaan nopeuttaa värjäytymien poistoa jauhepuhdistuksen yhteydessä ja parantaa aktiivisen hapen tunkeutumista hampaaseen hampaiden valkaisun yhteydessä.

3. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Jos koet jonkin seuraavista vakavista vaikutuksista, lopeta tuotteen käyttö välittömästi: nokkosihottuma, ihottuma ja kutina, allergiset reaktiot.

4. VARASTOINTI

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Älä käytä ORALSAN OxyGel etiketissä tai pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

5. AINESOSAT

Karbamidiperoksidi, glyseriini, puhdistettu vesi, dinatrium-EDTA, akrylaatti / C10-30-alkyyliakrylaatit, polymeeri, natriumhyaluronaaatti, propyleeniglykoli, kaliumnitraatti, natriumhydroksidi.

6. PAKKAUS

Til.nro 124002

Kit - 2 ruiskua 2 ml + 10 annostelukärkeä