

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Impregum™ Super Quick
Polyeetteri jäljennösmateriaali

**Jäljentää
jokaisen
yksityiskohdan
kahdessa
minuutissa**



Nopeampi ja tarkempi polyeetteri jäljennösaine

3M™ Impregum™ Super Quick

Impregum polyeetteri jäljennösaineet ovat tarjonneet luotettavan ratkaisun monimutkaisiin jäljentämistoimenpiteisiin. Kehitimme uuden 3M™ Impregum™ Super Quick polyeetteri jäljennösaineen takaamaan sen, että monimutkaistenkin töiden vaatimukset täyttyvät, tehokkuudesta tinkimättä. 3M™ Impregum™ Super Quick polyeetteri jäljennösaineessa yhdistyvät nopeuden lisäksi luotettavuus ja tarkkuus.

Toisin kuin A-silikonit, Impregum polyeetterin juoksevuus säilyy samanlaisena koko työskentelyajan. Voit käyttää ilmoitetun työskentelyajan kokonaisuudessaan ilman pelkoa siitä, että aine alkaisi kovettumaan. Kun työskentelyaika on päättynyt, kovettuminen alkaa välittömästi. Tämä varmistaa pientenkin yksityiskohtien tallentumisen ja vähentää epätarkkuuksia jotka voivat aiheutua lusikan liikkeestä suussa kovettumisen aikana.



Nopeampi kovettumisaika

Nopea ja luotettava; 45 sekunnin työskentelyaika ja kahden minuutin kovettumisaika mahdollistavat nopeat jäljennökset yksinkertaisissa potilastöissä.




100% polyeetteri. Luotettava tarkkuus

Impregumin erinomaiset flow-ominaisuudet auttavat parantamaan tarkkuutta pienimmissäkin yksityiskohdissa. Lopputuloksena on äärimmäisen tarkka jäljennös ilman huokosia.



Miellyttävämpi potilaskokemus

Aito polyeetteri jäljennösaine, jossa on täysin uusi koostumus ja minkä ansiosta materiaali kovettuu nopeasti ja maistuu paremmalle.

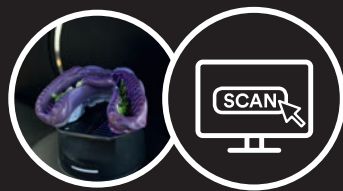

Helpompaa CAD/CAM työskentelyä

3M™ Impregum™ Super Quick materiaalilla otettu jäljennös voidaan skannata laboratorioskannereilla. Tämä helpottaa yhteistyötä vastaanoton ja laboratorion välillä.


terიაალი r Quick



Alkutilanne: Implantti (ensimmäinen premolaari) kuusi kuukautta implantoinnin jälkeen. Paranemisjatke kiinnitettyä.



3M™ Impregum Super Quick jäljennösaine ruiskutetaan jäljennöshetan ympärille elastomeeriruiskulla.

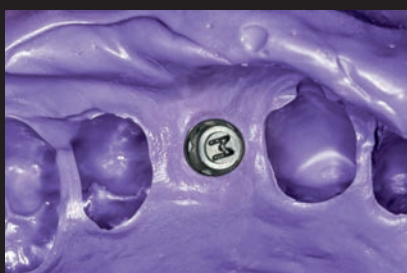

Jäljennöshetta kiinnittyy hyvin 3M™ Impregum™ Super Quick jäljennösaineeseen.



Kerrostettu keraaminen kruunu sementoituna implanttijatkeen päälle.

Kliininen potilastyö

Paranemisajan jälkeen, potilaalle tehdään kruunu ensimmäiseen premolaariin. Jäljennös otettiin käyttämällä 3M™ Impregum™ Super Quick polyeetteri jäljennösmateriaalia suljetun lusikan (monofaasi) jäljennöstekniikalla.

Tarkka lopputulos käyttämällä 3M™ Impregum™ Super Quick polyeetteri jäljennösmateriaalia monofaasijäljennöstekniikalla.

KORKEA TYTYVÄISYYS

Kliininen seuranta osoittaa **todella suurta tyytyväisyyttä** 3M™ Impregum™ Super Quick jäljennösmateriaalin tarkkuuteen ja **lopullisen työn istuvuuteen suussa.**

95 %



Lähde: 3M kenttätutkimus 447 osallistujaa Euroopasta ja USA:sta, 2017.

3M™ Impregum™ Super Quick

- Ensimmäinen, todella nopea polyeetteri jossa on 45 sekunnin työskentely ja 2-minuutin kovettumisaika.
- Monofaasi-jäljennöstekniikkaan
- Täydellinen jäljennösmateriaali erityisesti nopeisiin, yksinkertaisiin potilastöihin

3M™ Impregum™ Super Quick – Mikä on uutta?

Riittävä työskentelyaika ja erittäin nopea kovettumisaika

	Työskentelyaika	Kovettumisaika
Impregum™ Penta™ (Soft)	1:45	4:15
Impregum™ Penta™ Soft Quick	1:00	3:00
Impregum™ Penta™ Super Quick	0:45	2:00

Kovettumisaika jopa yli
50% nopeampi kuin
3M™ Impregum™ Penta™
materiaalilla.

Parannettu maku ja tuoksu

- mintun maku



Tilauksetiedot

Tuotenumero Tuotetieto

Peruspakkaus 3M™ Pentamix 3 sekoituslaitteeseen

UUSI

69383 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick
1 kpl base à 300ml, 1 kpl katalyytti à 60ml,
1 kpl 3M™ Penta™ kasetti,
10 kpl sekoituskärkeä (punainen),
1 kpl 3M™ Penta elastomeeriruisku,
1 pullo polyeetteriliimaa à 17ml,
3 kpl 3M™ Astringent rekraktiopasta kapseleita

P31770 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick
1 kpl base à 300ml,
1 kpl katalyytti à 60ml,
1 kpl 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick kasetti,
10 kpl Penta™ sekoituskärkeä (punainen),
1 Penta™ elastomeeriruisku,
1 pullo polyeetteriliimaa à 17ml

P31734 3M™ Impregum™ Penta™ Soft
1 kpl base à 300ml,
1 kpl katalyytti à 60ml,
1 kpl 3M™ Impregum™ Penta™ Soft kasetti,
10 kpl Penta™ sekoituskärkeä (punainen),
1 kpl Penta™ elastomeeriruisku, 1 pullo polyeetteriliimaa à 17ml

P31684 3M™ Impregum™ Penta™
1 kpl base à 300ml,
1 kpl katalyytti à 60ml,
1 kpl 3M™ Impregum™ Penta™ kasetti,
10 kpl Penta™ sekoituskärkeä (punainen),
1 kpl Penta™ elastomeeriruisku, 1 pullo polyeetteriliimaa à 17ml



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick
peruspakkaus (69383)

Refillit

UUSI

69385 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick
2 kpl base à 300ml, 2 kpl katalyytti à 60ml

31764 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick
2kpl base à 300ml, 2 kpl katalyytti à 60ml

31730 3M™ Impregum™ Penta™ Soft
2kpl base à 300ml, 2 kpl katalyytti à 60ml

31644 3M™ Impregum™ Penta™
2kpl base à 300ml, 2 kpl katalyytti à 60ml

UUSI

Kasetit 3M™ Pentamix™ 3-laitteelle

69387 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick -kasetti

P3775 3M™ Impregum™ Penta™ Soft Quick -kasetti

P3787 3M™ Impregum™ Penta™ Soft -kasetti

P3792 3M™ Impregum™ Penta™ -kasetti

Jäljennösaineiden sekoituslaite ja lisätarvikkeet

77871 3M™ Pentamix™ 3 sekoituslaite

77949 3M™ Penta™ sekoituskärjet (punainen), 50 kpl

30600 1 kpl polyeetteri lusikkaliima à 17 ml

www.3M.fi/impregumsuperquick



Suomen 3M Oy
3M Oral Care
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Tel. (09) 52 521
www.3MESPE.fi

3M, "3M Science. Applied to Life", Impregum, Penta ja Pentamix ovat 3M:n tai Deutschland GmbH:n tuotemerkkejä. © 3M 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Muistathan kierrättää. BR611259-1F1180302.