

KAIKKI MITÄ TARVITSET YHDESSÄ SARJASSA ≈

MTAFlow- ja MTAFlow White korjaussementtisarjojen mukana toimitetaan kaikki sementin sekoittamiseen ja annosteluun tarvittavat välineet. Sarjan sisältämä jauhe ja geeli riittävät 8–10 käyttökertaan. Sarja sisältää myös mittalusikan sekä tarkkaan annosteluun tarvittavat välineet – 10 Skini-ruiskua, 20 Micro Tip (20 G) -kärkeä ja 10 Luer Lock Cap -korkkia.



5980 MTAFlow White Kit -sarja
(8–10 käyttökertaa / sarja)

1 kpl tekninen opas
1 kpl käyttöohje
1 kpl MTAFlow Powder -jauhe (2 g)
1 kpl MTAFlow Gel -geeliä (2 ml)
1 kpl mittalusikka
20 kpl Micro Tip -kärkiä (20 G)
10 kpl Skini Syringe -ruiskuja
10 kpl Luer Lock Cap -korkkeja



3980-1 MTAFlow Kit -sarja
(8–10 käyttökertaa / sarja)


1 kpl tekninen opas
1 kpl käyttöohje
1 kpl MTAFlow Powder -jauhe (2 g)
1 kpl MTAFlow Gel -geeliä (2 ml)
1 kpl mittalusikka
20 kpl Micro Tip -kärkiä (20 G)
10 kpl Skini Syringe -ruiskuja
10 kpl Luer Lock Cap -korkkeja

MYÖS SAATAVANA ULTRADENT PRODUCTSILTA ≈

NaviTip™ 29 G -kärjet

- Hallittu vienti kaikkialle kanavaan
- Taipuisa kanyyli liikkuu helposti käyrissä kanavissa

NaviTip™ -kärjet	20 kpl/ pakkaus	50 kpl/ pakkaus
	29 G	29 G
17 mm, White	5112	1378
21 mm, Yellow	5113	1374
25 mm, Blue	5114	1376
27 mm, Green	5115	1377
Lajitelma	5116	1379

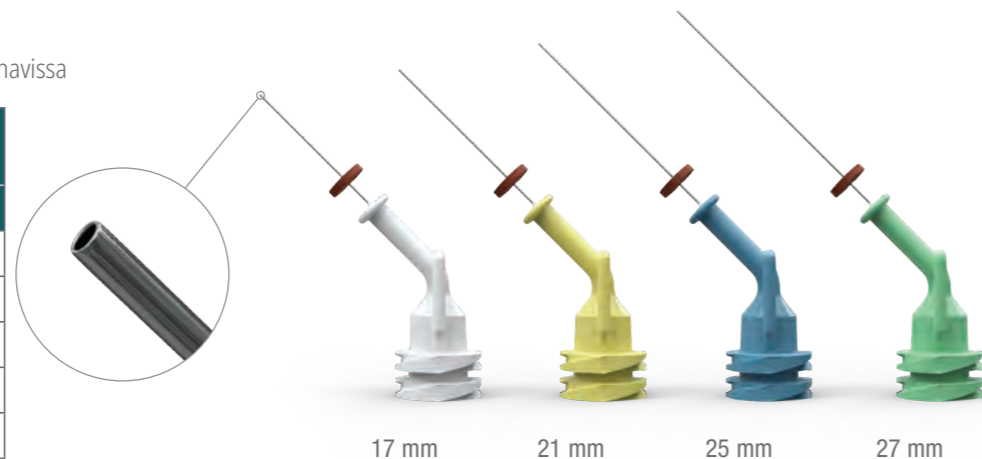

Seuraa meitä!



eu.ultradent.blog

UPP 680-FI 01-2022

ULTRADENT.EU

© 2022 Ultradent Products, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

ENDGEZE™ **MTA FLOW™** **WHITE**

MINERAALITRIOKSIDIAGGREGAATTI-KORJAUSSEMENTTI

**UUSI VALKOINEN VÄRJÄÄMÄTÖN KOOSTUMUS –
SAMAT OMINAISUUDET KUIN ALKUPERÄISESSÄ
MTA FLOW-KORJAUSSEMENTISSÄ**




Uudessa MTAFlow™ White -korjaussementissä on samat ominaisuudet kuin alkuperäisessä MTAFlow-korjaussementissä: molemmat on suunniteltu helposti sekoitettaviksi ja annosteltaviksi haluamassasi koostumuksessa.

NaviTip™ 29 G -kärki takaa tarkan asetuksen apeksifikaatiota, apikaalista tulppaa ja resorptiota varten.

BIOAKTIIVISEN KORJAUSSEMENTIN LUOTETUT OMINAISUUDET **VÄRJÄMÄTÖN KOOSTUMUS**

MTAFlow White -korjaussementin värjäämätön koostumus kehitettiin vaihtoehdoksi hampaiden esteettisellä alueella tehtäviin toimenpiteisiin – esim. hammaskiilteen rajan yläpuolella.

Kummankin MTAFlow-korjaussementin koostumus on hyvin tasaista hienojakaisen jauheen ja geelimäisen sekoitusaineen ansiosta. Koostumus vähentää valumista, mikä auttaa takaamaan, että seos pysyy siellä, mihin se annostellaan.

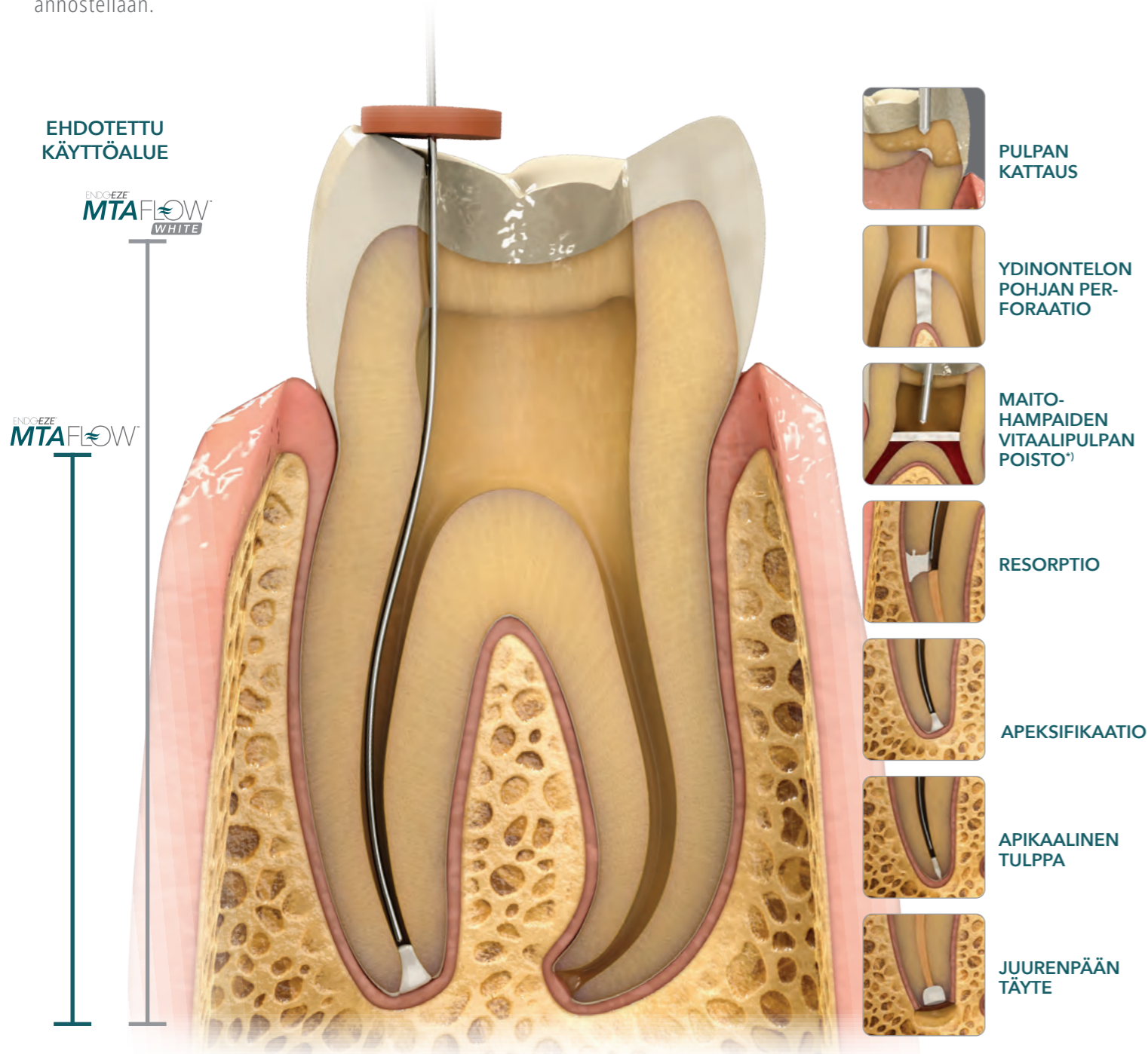


Kumpikin MTAFlow -korjaussementti on bioaktiivista. Hydroksiapatiitti (HA) peittää kudosteille altistuvan MTA:n pinnan. HA-kerros ei enää vaikuta vieraalta materiaalilta eläville soluille. Tämä tukee paranemista.¹

1. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, et al. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. J Endod. 2005;31:97-100.

*) Varoitus: MTA:n antimikrobiset ominaisuudet ovat rajalliset. Jos MTAFlow-korjaussementtiä käytetään maitohampaiden vitaalipulpan poistoon, käytä toimenpiteessä ainoastaan steriiliä vettä.

OIKEA KOOSTUMUS OIKEAAN TOIMENPITEESEEN

Kummankin MTAFlow-korjaussementin jauheen ja geelin sekoitussuhteen voi valita toimenpiteen mukaan. MTAFlow White -sementin värjäämätön koostumus on tarkoitettu erityisesti esim. maitohampaiden vitaalipulpan poistoon*) ja pulpan kattamiseen. Sitä voidaan kuitenkin käyttää kaikkiin MTAFlow-korjaussementille sopiviin toimenpiteisiin.

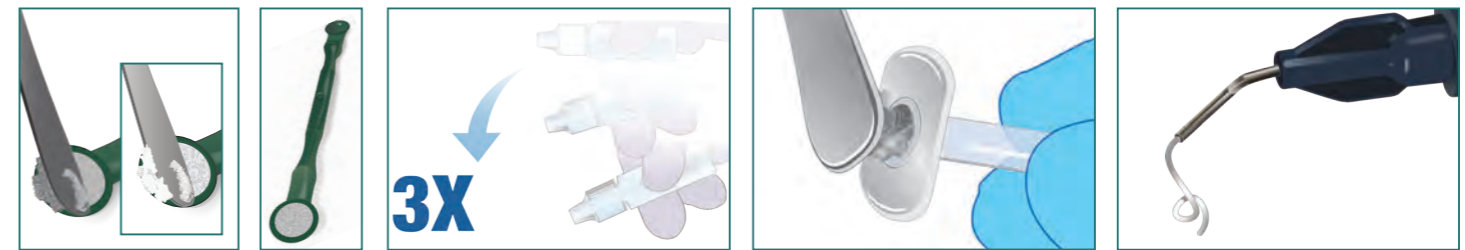

1. Poista ylimääräinen jauhe sekoituslastalla. Tasoita jauheen pinta AINA lusikan reunan mukaan.


2. Ravista 3 kertaa ylhäältä alaspäin. Varmista ennen annostelua, että geeli on pullon kärjen päässä.

3. Täytä sekoitettu Endo-Eze MTAFlow -sementti sekoittamisen jälkeen läpinäkyvän Skini Syringe -ruiskun takaosaan.

4. Aseta mäntä paikalleen ja purista kärjestä pieni määrä sementtiä.



5. Ruiskun sisältämän sekoitetun Endo-Eze MTAFlow -sementin voi käyttää 15 minuutin kuluessa.

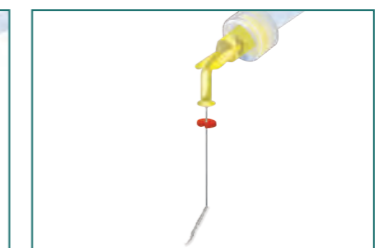

6. Valitse ohut koostumus ja NaviTip™ 29 G -kärki Endo-Eze MTAFlow -sementin annosteluun kanavaan.

Paksumpaa koostumusta käytetään pulpan kattamiseen, ydinontelon pohjan perforaatioon ja maitohampaiden vitaalipulpan poistoon*); ohutta koostumusta käytetään resorptioon, apeksifikaatioon ja apikaalisena tulppana; putty-koostumusta käytetään juurenpään täyteenä.

Voit luottaa siihen, että MTAFlow-korjaussementit ovat tehokkaita, ei-rakeisia ja helppoja annostella tarkasti. Lisäksi MTAFlow White -korjaussementti on värjäämätön!

SEKOITUSSUHTEEN EHDOTUKSIA (JAUHE JA GEELI):*

KÄYTTÖTARKOITUKSET	PULPAN KATTAMINEN, YDINONTELON PERFORAATIO, MAITOHAMPAIDEN VITAALIPULPAN POISTO*)	RESORPTIO, APEKSIFIKAATIO, APIKAALINEN TULPPA	JUURENPÄÄN TÄYTE
JAUHE (MITTALUSIKKA)	2 isoa lusikkaa (0,26 g)	1 iso lusikka plus 1 pieni lusikka (0,19 g)	1 iso lusikka plus 1 pieni lusikka (0,19 g)
GEELIPISARAT	3 pisaraa	3 pisaraa	1 pisara**
KOOSTUMUS	Paksu	Ohut	Putty
ANNOSTELUKÄRKI	Micro™ Tip -kärki (20 G)	NaviTip™ -kärki (29 G)	Annostelu ilman ruiskua

* Geeliä tai jauhetta voi lisätä tavoiteltua koostumusta varten.

** Riippuu tavoitellusta koostumuksesta.