



Fusion™ Anterior Matrix System

Garrisonin täysin uusi Fusion™ Anterior Matrix System -matriisijärjestelmä tarjoaa materiaalit ja tekniikat monenlaisten etuhammasleesioiden luotettavaan korjaukseen.

”Asiakkaamme olivat uuden Fusion Anterior Matrix -järjestelmän inspiraation lähde” sanoo Jason Phillips, Garrisonin markkinointijohtaja. ”He kuvailivat miten käyttivät metallisia taka-alueen matriisejamme uniikilla tavalla etuhampaiden anatomian täydelliseen synnyttämiseen. Työskentelimme monien kanssa tuon konseptin siirtämiseksi tähän uuteen järjestelmään.”

Jäykät **metallinauhut** ovat merkittävästi ohuempia kuin perinteiset muovistripsit. Ne voidaan viedä paikalleen olemassa olevan kontaktin läpi ja sulkukseen syvempiä täytteitä varten. Ihanteellinen gingivaali/inkisaalianatomia ja fackiaali/linguaalianatomia ovat sisäänrakennettuja, mikä helpottaa kriittisen etualueen muotoilemisesta.

Fusion **Anterior wedge-kiila** painaa nauhan tiukasti hampaan ympärille, ja lukitsee sen paikalleen - auttaen vapauttamaan klinikon kädet. Ne liukuvat hellävaraisesti papillan vierestä, päätyen alemmaksi hammasvälissä, jolloin ne antavat maksimaalisen separoinnin auttaen samalla vähentämään mustien kolmioiden riskiä.

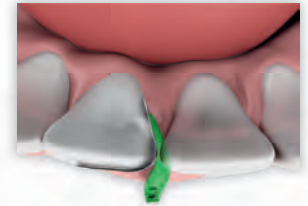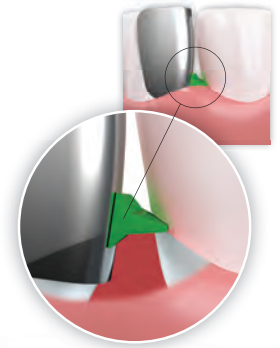

ANK01

Coffret
ANK01

Kuvaus


50 lyhyttä nauhaa (AN100),
50 pitkää nauhaa (AN200),
25 ekstrapientä kiilaa (ANYL), ● XS
25 pientä kiilaa (ANBL), ● S
25 keskikokoista kiilaa (ANOR), ● M
25 isoa kiilaa (ANGR) ● L



Ohjeet
käyttäjälle

Tapausselostus

Sivulta 39 löytyy tapausselostus liittyen uuteen Fusion™ Anterior etuhammasmatriisijärjestelmään.

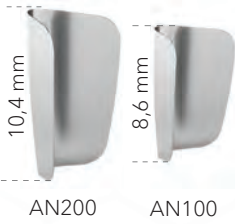

Fusion™ Anterior Matrix sisältää runsaasti parannuksia, joiden myötä on helpompi rakentaa ihannekontakteja, nopeasti ja luotettavasti.

- Vain 0.038 mm - merkittävästi ohuempat kuin stripsit, tuloksena parempi approksimaalinen kontakti.
- Jäykkä ruostumaton teräs ei muuta muotoaan paikalleen asettelun tai paikkausmateriaalin viennin aikana.
- Täysin ylivoimainen suhteessa stripsiin, kun korjataan isoja tai syviä kariesvaurioita.

Täyttöpakkaukset

AN100	Fusion™ lyhyttä nauhaa / 8,6 mm
AN200	Fusion™ pitkä nauhaa / 10,4 mm

Lkm

100/pakk
100/pakk



Fusion™ Anterior Wedge-kiilan fiksut ominaisuudet tekevät siitä "pakollisen" kaikkiin etualueen korjauksiin.

- Radikaalinen käyrä muoto varmistaa tiiviin sauman kervikaalireunassa, fakiaalipuolelta linguaalipuolelle.
- Kapeneva separaattorireuna antaa sinun säätää painetta, jolloin voit vaikuttaa siihen kuinka tiukka kontaktista tulee.
- Kervikaalinen kontaktipinta on puoliksi sulkuksen yläpuolella ja puoliksi alapuolella, mikä parantaa sen adaptaatiota syviin restauraatioihin.


Kiilat

Kuvaus

ANK4	Fusion™ Anterior kiilat lajitelma 100 kutakin kokoa
ANK4-M	Fusion™ Anterior kiilat lajitelma 50 kutakin kokoa

Lkm

400/pakk
200/pakk

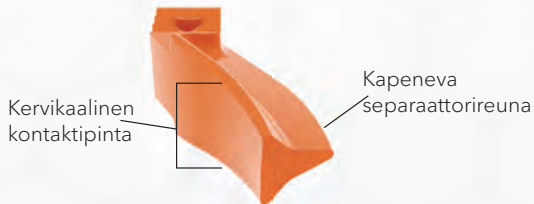

Täyttöpakkaukset

ANYL	xtra-small, keltainen	● XS
ANBL	small, sininen	● S
ANOR	medium, oranssi	● M
ANGR	large, vihreä	● L

100/pakk
100/pakk
100/pakk
100/pakk