



## Helix-testi

### Käyttöohje

1. Ruuvaa testilaitteen korkki irti. Varmista että Helix-testi on kuiva.
2. Taita testiliuska katkoviivan kohdalta niin, että indikaattorit jäävät sisäpuolelle.
3. Laita taivutettu indikaattori taitepuoli edellä korkkiin. Indikaattorin virheellinen kiinnittäminen korkkiin voi johtaa väärin tuloksiin.
4. Ruuvaa korkki tiivisti kiinni. Aseta testi autoklaaviin keskitasolle.
5. Aja ohjelma läpi 134° 3,5 min. / 121° 15 min.
6. Poista testilaite ohjelman päätyttyä. Avaa kapselin korkki ja poista testiliuska tulkintaa varten.

### Testitulokset

Testi on onnistunut, kun indikaattorin merkit ovat muuttuneet keltaisesta mustaksi.

### Autoklaavin Helix-testi

Sisältää: Testilaite ja testiliuskat 100 kpl  
Helix- testi EN 867-5 / ISO 11140-1 Type 5

Til.nro 352050 Helix testi 1 kpl + 100 kpl