

MAGNUM-TUOTTEET JUURIHOITOOON

Magnum Dental korkki sopii kolmelle eri ruiskutyypille

Suosittelaa käytettäväksi Luer Lock -kiinnitystä



Luer Lock



Luer Slip Centric



Luer Slip Eccentric

- Vähentää kontaminaation mahdollisuutta
- Vähentää vuotamisen mahdollisuutta
- Vähentää läikkymistä käytön aikana
- Vähentää hajua ja hengitystä
- Helppo ruiskuliitääntä
- Kierrä ruisku ON ja OFF
- Ruisku pysyy kiinni täyttöprosessin ajan

*Luer slip ruiskuja voidaan myös käyttää

KLOORIHEKSIDIINI GLUKONAATILIUOS (CHX) 2%

Klooriheksidiiniliuos juurikanavien huuhteluun

- Käyttövalmis liuos, erityisesti juurihoitoon
- Puskuroitu ja stabiili koostumus, joka ylläpitää liuoksen ominaisuudet sen voimassaoloajan
- Laaja bakterikirjo

250 ml



NATRIUMHYPOKLORIITTI (NaOCI)

1 %, 3 % ja 6 % stabiloitu liuos juurikanavien huuhteluun

- Käyttövalmis liuos, erityisesti juurihoitoon
- Helpottaa liuottamaan orgaaniset yhdisteet juurikanavasta
- Puskuroitu ja stabiili koostumus, joka ylläpitää liuoksen ominaisuudet sen voimassaoloajan
- Laaja bakterikirjo

250 ml



EDTA-neste 17 %

Juurikanavien laajentamiseen ja instrumenttien liukastamiseen

- Käyttövalmis liuos
- Vaikuttaa ja puhdistaa sekä kemiallisesti että mekaanisesti
- Smear layerin poistoon

250 ml



KÄYTTÖOHJEET:



1. Pyöritä pois korkin ylin osa



2. Valitse ruisku (suositellaan 10 ml)



3. Pyöritä Luer Lock -kärki kiinni (suositellaan 10 ml)

TAI



paina Luer Slip -kärki kiinni



4. Täytä ruisku



5. Pyöritä Luer Lock -kärki pois TAI vedä ulos Luer Slip -kärki



6. Kierrä yläkorkki kiinni



7. Kiinnitä huuhteluneula tukevasti ruiskuun ja huuhtele. Poista ja hävitä ruisku sekä huuhteluneula.

Katso käyttöohjevideo:

