



wave • one[®] GOLD

The ONE file reciprocating system



GOLD TECHNOLOGY – joustavampi viila

- **Turvallinen** – pienempi ruuvautumis- ja katkeamisriski
- **Helppo** – vain yksi viila
- **Hygieeninen** – jokaiselle potilaalle oma viila
- **Aikaa säästävä** – yksinkertainen käyttää

+
**WE
KNOW
ENDO.**


DENTSPLY
MAILLEFER

Turvallinen – pienempi viilan katkeamisriski

WaveOne Gold on turvallinen resiprokaatioliikkeen ansiosta. Resiprokaatio muuttaa viilan liikettä toistuvasti edestakaisin.

- Laaja, yhdensuuntaisesti pyörivä liike leikkaa tehokkaasti.
- WaveOne Gold viilan pienempi, takaisinsuuntaava liike


Resiprokaatio vähentää viilan kanavaseinämään ruuvautumista ja pienentää siten viilan katkeamisriskiä – WaveOne Gold lisää turvallisuutta.

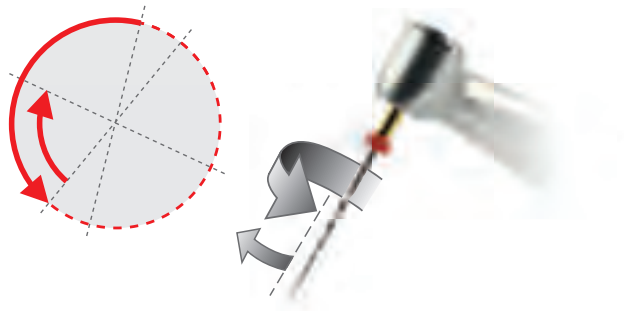


Helppo – vain yksi viila

Liukupolun valmistelu →

SMALL #020 .07




PRIMARY #025 .07




Suurin osa kanavista

MEDIUM #35 .06



LARGE #45 .05



- Preparoi kanavaa valitulla instrumentillä 4-5 sekuntia – viilan tulee olla jatkuvassa liikkeessä
- Puhdista viila preparointijätteestä ja huuhtelee kanava säännöllisesti
- Toista, kunnes saavutat työskentelymitan

Hygieeninen – jokaiselle potilaalle uusi viila

WaveOne Gold viilat on pakattu valmiiksi-steriloituihin, potilaskohtaisiin pakkauksiin. Viiloja ei voi autoklavoida.

Juurihoitoviilojen kertakäyttöisyys tuo mukanaan useita etuja:

- Preparointi aina uudella viilalla pienentää sen katkeamisriskiä
- Ei kontaminaatiovaaraa
- Optimaalinen leikkausteho




Aikaa säästävä – yksinkertainen käyttöä

WaveOne Gold viilojen kanssa sinun ei tarvitse enää:

- Vaihtaa instrumenttia kesken toimenpiteen
- Puhdistaa ja steriloida instrumenttejä uusiokäyttöön
- Järjestellä viiloja tai pitää kirjaa siitä, kuinka usein niitä on käytetty

Golden technology – joustavampi viila

- Vahvistaa potilasturvallisuutta (vähentää viilan katkeamisriskiä)
- Laajempi käyttöalue
- Lyhentää muotoilu-aikaa

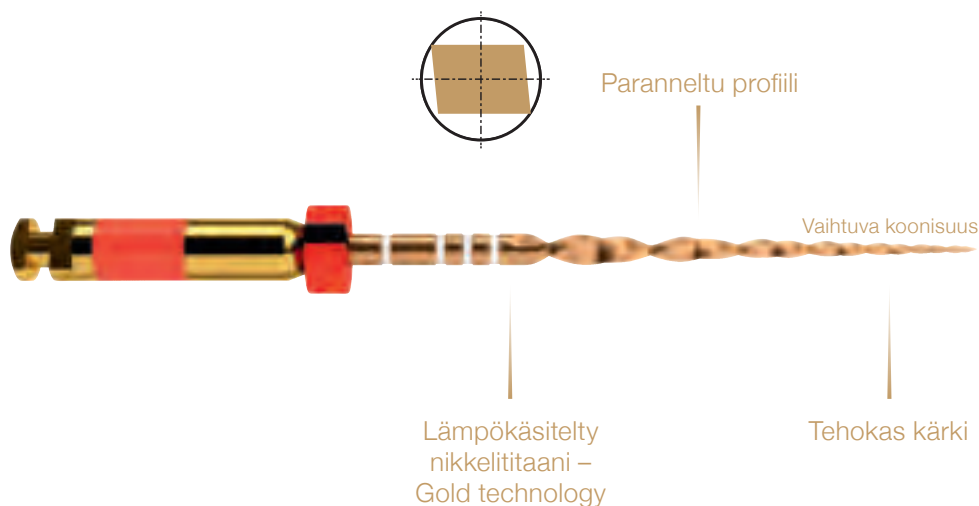

One Complete Solution



WAVEONE® GOLD Viilat



small

6x small (020 07) – 21mm – A 0756 221 G0S 03
6x small (020 07) – 25mm – A 0756 225 G0S 03
6x small (020 07) – 31mm – A 0756 231 G0S 03



primary

6x primary (025 07) – 21mm – A 0756 221 G0P 03
6x primary (025 07) – 25mm – A 0756 225 G0P 03
6x primary (025 07) – 31mm – A 0756 231 G0P 03



medium

6x medium (035 06) – 21mm – A 0756 221 G0M 03
6x medium (035 06) – 25mm – A 0756 225 G0M 03
6x medium (035 06) – 31mm – A 0756 231 G0M 03



large

6x large (045 05) – 21mm – A 0756 221 G0L 03
6x large (045 05) – 25mm – A 0756 225 G0L 03
6x large (045 05) – 31mm – A 0756 231 G0L 03

Lajitelma



1x small/primary/medium/large – 21mm
A 0754 221 G9A 03



1x small/primary/medium/large – 25mm
A 0754 225 G9A 03



1x small/primary/medium/large – 31mm
A 0754 231 G9A 03

WAVEONE® GOLD Paperinastat



Laatikko 180x

small – A 1750W 000 00S 03
primary – A 175W 000 00P 03
medium – A 175W 000 00M 03
large – A 175W 000 00L 03



WAVEONE® GOLD Gutta-percha nastat



Laatikko 60x

small – A 1750X 000 00S 00
primary – A 175X 000 00P 00
medium – A 175X 000 00M 00
large – A 175W 000 00L 00



KITS



A 1035 810 000 27


X-SMART® PLUS Starter Kit

1x X-Smart Plus endomoottori
kulmakappaleella

5x blister WaveOne Gold Primary
viila 25mm (15 viilaa)

4x blister WaveOne Gold
lajitelma 25mm (16 viilaa)

1x blister Proglider 25mm (3 viilaa)

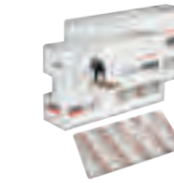

A 1054 100 000 00

X-SMART IQ WAVEONE GOLD Starter Kit

1x X-Smart iQ endomotor
aloituspakkaus

1x X-Smart iQ endo
käsiappale

1x X-Smart iQ kulmakappale

1x XSmart iQ suojakotelo

5x blister WaveOne Gold Primary
25 mm (15 viilaa)

4x blister WaveOne Gold lajitelma
25 mm (16 viilaa)

1x blister Proglider 25mm (3 viilaa)



Sealer



606.20.118

AH Plus Jet® Refill

2x ruiskua à 15 g

606.20.116 AH Plus Jet®

Mixing/Intra Oral Tips Refill

40x Sekoitus/Intraoral kärjet
Oral Tips

Juurikanavan lääkitseminen



606.20.123 AH Temp™ Kit

4x Ruiskua à 0.75 ml

20x Vientikärkeä

606.20.124 AH Temp™ Cannulas Refill

20x Vientikärkeä

A88013S1 Disposa Shield®

500x Kertakäyttöisiä suojuksia

DENTSPLY Nordic Baltic

Box 2024, SE-128 21 Skarpnäck
Tel +46 (0)8 685 65 05
Fax +46 (0)8 447 60 55
www.dentsply.eu

Yhteystiedot Suomessa

www.dentsply.se
www.dentsply.fi
www.dentsply.no
www.dentsply.dk
Tel LV + 371 29 455 945
Tel LT + 370 605 80858

Tarkemmat tuotetiedot: www.dentsplymallefer.com