

DENTO-PREP™ DUST-CABINET 12V

KÄYTTÖOHJEET

REF 1905 | fi

Käyttötarkoitus:

DUST-CABINET on tarkoitettu käytettäväksi DENTO-PREP™ kanssa suoritettaviin jauhepuhalluksiin.

Valmistelu:

Kytke virtakaapeli ja DUST-CABINET on käyttövalmis. DUST-CABINET ikkuna voidaan poistaa työntämällä/liu'uttamalla sitä ylöspäin.

Varoimenpiteet:



- ⚠ Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- ⚠ Irrota virtalähde DUST-CABINETista puhdistuksen ja suodattimen vaihdon ajaksi.
- ⚠ DUST-CABINETia käytettäessä on käytettävä käsineitä.

Huolto:

DUST-CABINETin säännöllistä puhdistamista suositellaan: Irrota ikkuna ja imuroi käytetty jauhe.

Suodattimen vaihto:

DUST-CABINET on varustettu pölysuodattimella, joka suojaa sisäänrakennettua elektronista imujärjestelmää jauheelta. Tarkasta suodatin säännöllisesti. Jos suodatin on vaurioitunut tai kulunut, vaihda suodatin vaiheiden 1-4 mukaisesti.

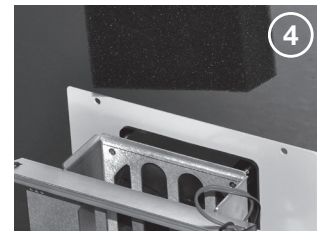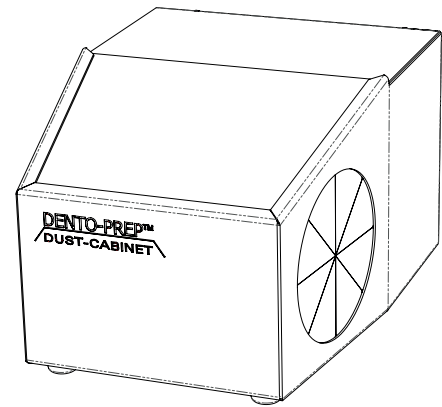

Tekniset tiedot:

Mitat:	Korkeus 180 mm – Leveys 222 mm – Syvyys 298 mm
Paino:	3776 grams
Virtalähde:	12 VDC / 1A
Lamppu:	LED HF210034, 12 VDC, 3,9 W, 4000 K, 900 lumenia
Kaapin materiaali:	Jauhemaalattu teräs
Kkuna:	Pleksilasi

Hävittäminen:

Poista DUST-CABINET käytöstä, jos laite on vaurioitunut tai siinä on näkyviä kulumisen merkkejä. Hävitä DUST-CABINET viimeisen käyttökerran jälkeen sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen WEEE-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

Takuu: 2 vuotta



RØNVIG Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59 • DK-8721 Daugaard • Tanska

Tel.: +45 70 23 34 11 • Fax: +45 76 74 07 98 • E-mail: contact@ronvig.com • www.ronvig.com

