



# Syvää hemostaasia varten

## Kudoshallinta

Ainutlaatuinen kudoshallinta alkaa nopealla ja syvällä hemostaasilla.

Jo yli 40 vuoden ajan hammaslääkärit ovat luottaneet Ultradentin kudoshallintatuotteisiin välittömän hemostaasin ja tarkkojen reunojen luomisessa sekä pintavuotojen ja ientaskunesteen poistamisessa.



## Tekninen opas



**1**  
Vuotavat subgingivaaliset kudokset preparoinnin ympärillä. Vuoto pitää saada hallintaan ennen minkään toimenpiteen aloittamista.



**2**  
Metal Dento-Infusor™ -kärjen pehmustettu harjapää sopii ihanteellisesti hemostaasiaineiden infusointiin vuotaviin kapillaareihin. Painele hemostaasiainetta tiiviisti ientaskua vasten, kunnes verenvuoto tyrehtyy.



**3**  
Poista hyyytymät ilmapuustilla/vesisuihkulla.



**4**  
Tarkista kudoksen hyvä ja syvä hemostaasi. Jos havaitset vielä vuotoa, toista vaiheet 2–3.



**5**  
Kastele Ultrapak™ -neuloslanka hemostaasiaineessa. Pakkaa kasteltu neuloslanka ientaskuun ja anna olla siellä 1–3 minuuttia. Tämä auttaa siirtämään kudoksen.



**6**  
Kaksilankatekniikkaa käytettäessä poista ylempi lanka, käytä ilmapuustia/vesisuihkua, ja kuivaa.

## TESTAA PAINELUTAITOSI

Käytätkö sopivaa painetta, jolla saavutetaan nopea ja syvä hemostaasi?

**Ohje:** Hiero Dento-Infusor™ -kärjellä merkittyä aluetta.

